

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 経腸栄養注入セット 70400000
けんだくボトル B 型 300ml

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造】

1. 形状・構造

本品は、ボトルとキャップからなり、ISO 80369-3 に適合する。



2. 材質

ボトル：ポリプロピレン
キャップ：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

胃又は腸に挿入したカテーテルと連結して、内服液剤投与等に使用する器具である。本品は、ISO 80369-3 に適合するものである。

【使用方法等】

1. キャップを取り外し、ボトル内に薬剤及び温湯及び流動食等を投入する。
2. 薬剤の場合、キャップを締めて10分以上放置
3. カテーテルへ確実に接続し、ボトルを握り圧をかけ加圧により投与します。
4. 投与が終わったら、逆流しないようにカテーテルを折り曲げます。
5. カテーテルからけんだくボトル B 型 300ml を取り外します。

【使用上の注意】

1. 経腸栄養ライン以外で使用しないこと
2. けんだくボトル B 型 300ml は、繰り返し使用を推奨しておりません。
3. 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ及び詰まりには十分に注意すること。
4. けんだくボトル B 型 300ml の目盛りは目安として使用すること。
5. コネクタ接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。(コネクタが外れなくなる、又はコネクタの破損、接続部からの液漏れの恐れがある)
6. 電子レンジは使用できません。

【保管方法及び有効期間】

1. 水濡れに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
2. 冷蔵保管際、衝撃が加わると本品が破損する可能性があります。
3. 有効期間：3年

【製造販売者の氏名又は名称】

製造販売（お問い合わせ先）
診療化成 株式会社
電話番号 0247-46-3297

製造
診療化成 株式会社