

改訂日
2020年4月作成

医療機器届出番号：07B3X10010000004

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 経腸栄養注入セット 70400000
滅菌済けんだくボトルB型100ml

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造】

1.形状・構造

本品は、電子線滅菌済のボトルとキャップからなり、ISO 80369-3に適合する。



2.材質

ボトル：ポリプロピレン
キャップ：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

胃又は腸に挿入したカテーテルと連結して、内服液剤投与等に使用する電子線滅菌済の器具である。
本品は、ISO 80369-3 に適合するものである。

【使用方法等】

1. 包装を開け、滅菌済けんだくボトルB型100mlを取り出します。
2. キャップを取り外し、ボトル内に薬剤及び温湯等を投入する。
3. キャップを締めて、10分以上放置(この間に薬剤が崩壊します)
4. カテーテルへ確実に接続し、ボトルを握り圧をかけ加圧により薬剤を投与します。
5. 薬剤の投与が終わったら、逆流しないようにカテーテルを折り曲げます。
6. カテーテルから滅菌済けんだくボトルB型100mlを取り外します。

【使用上の注意】

1. 経腸栄養ライン以外で使用しないこと
2. 滅菌済けんだくボトルB型100mlは、繰り返しの使用を推奨していません。
3. 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ、及び薬剤の詰まりには十分に注意すること。
4. 滅菌済けんだくボトルB型100mlの目盛りは目安として使用すること。
5. コネクタ接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。
(コネクタが外れなくなる、又はコネクタの破損、接続部からの液漏れの恐れがある)
6. 電子レンジは使用できません。

【保管方法及び有効期間】

1. 水濡れに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
2. 冷蔵保管際、衝撃が加わると本品が破損する可能性があります。
3. 有効期間:1年

【製造販売業者の氏名又は名称】

製造販売(お問い合わせ先)
診療化成 株式会社
電話番号 0247-46-3297

製造

診療化成 株式会社